

## MENOFIX

**Conceput pentru a ameliora imediat crampele menstruale, prin furnizarea de căldură de 50-60°C, cu o durată de acțiune de până la 8 ore.**

**INDICAȚIE:** Plasture termic pentru ameliorarea durerilor generate de crampele menstruale. Este activ timp de până la 8 ore.

### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

1. Scoateți plasturele termic din pungă.
2. Agitați ușor plasturele de mai multe ori pentru a activa ingredientele; curând va începe să se încălzească.
3. Îndepărtați învelișul de protecție pentru a descoperi partea adezivă.
4. Așezați plasturele deasupra lenjeriei, pe burtă sau pe spate.

**PRECAUȚII:** • Doar pentru uz extern.

- A nu se utiliza direct pe piele pentru a preveni arsurile.
- Manipulați punga și plasturele cu atenție pentru a evita deteriorarea acestora.
- A nu se utiliza în timpul sarcinii.
- Poate fi utilizat de adolescente cu vârsta de peste 12 ani.
- Nu aplicați plasturele în caz de cicluri menstruale anormale (adică sângerări abundente).
- Supravegherea este necesară pentru utilizarea la/de către copii, persoane vârstnice, cu handicap sau de către persoanele cu pielea sensibilă.

**CUM SE PĂSTREAZĂ:** A se depozita într-un loc răcoros, uscat și întunecat și într-un recipient etanș la temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a bebelușilor.

**INGREDIENTE:** fier, apă purificată, carbon activat, sare (clorură de sodiu), acrilat de sodiu, pudră de monzonit de cuarț, vermiculit modificat.

Acesta este un dispozitiv medical. În cazul în care aveți cunoștință de orice incident grav referitor la acest dispozitiv medical, vă rugăm să informați producătorul sau ANMDM la datele de contact de mai jos:

**FABRICAT DE: WOOSHIN LABOTTACH CO., LTD.**

Adresa: (Songdo BRC SMART Valley B 109, 915, 1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020), 30 Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Oraș Incheon, Republica Coreea

**Wooshin LaPache d.o.o.**

Industrijska cesta 1J, 1290 Grosuplje, Slovenia

Tel. +386 8 20 50 963,

E-mail: wooshinlabo-eur@wooshinmed.com

**IOULIA AND IRENE TSETI PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. "INTERMED S.A."**

Str. Kalyftaki 27, GR 145 64 Kifissia, Atena – Grecia

Tel.: +30 210 6253905, Fax: +30 210 6253906,

www.intermed.com.gr / www.eva-intima.com

**DISTRIBUTOR: ND MEDHEALTH SRL**, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, în incinta Iride Business Park, Sector 2, București, România, Tel/Fax 021 233 95 71.

**Nu aplicați direct pe piele!**

**LOT:** A se vedea pe ambalaj

**EXP:** A se vedea pe ambalaj

**EAN 5205152012702**