



ACUM TOATE PREZERVATIVELE DUREX **AU ACEAȘI DISPUNERE**

PENTRU MAI PUȚINĂ PRESIUNE & **MAI MULTĂ PLĂCERE**

Prezervativ Durex Real Feel


Prezervativele Durex Real Feel sunt fabricate dintr-un material special, care pot asigura un confort sporit la purtare și nu prezintă probleme pentru persoanele sensibile la latex. Materialul prezervativului este mai moale și mai subțire, oferind o senzație naturală



- Forma anatomică Easy-On cu rezervor pentru confort
- Prezervativ transparent din poliizopren, adecvat persoanelor alergice la latex
- Diametru nominal: 56 mm
- Lubrifiere: lubrifiant siliconic standard
- Testate dermatologic;*
- 100% testat electronic;**

*Potrivit unui studiu de toleranță cutanată realizat în 2018

**Toate prezervativele Durex sunt testate pentru a depista defectele de fabricație

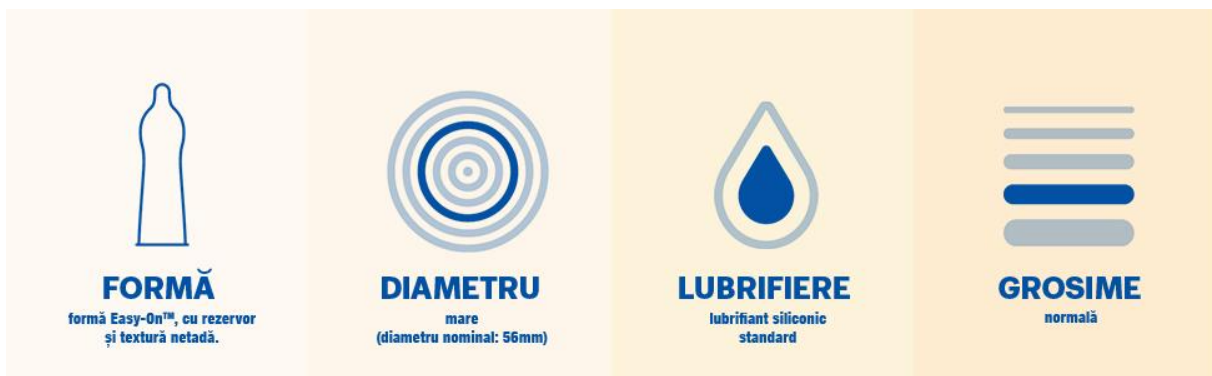

Senzație naturală

Prezervativul Durex Real Feel este fabricat cu ajutorul unei tehnologii noi, dintr-un material non-latex, poliizopren, care este asemănător cu pielea naturală.



CU FORMA



EASY-ON™



Utilizare:



Calitate Durex

Durex întrunește standardele internaționale de calitate***, lăsându-ți posibilitatea de a savura experiențe sexuale excelente, fără bătaie de cap. ***EN ISO 15223-1:2016; EN 1041:2008+A1:2013; EN ISO 10993-1:October 2009; ISO 13485: 2016; ISO 14971:2012; ISO 23409:2011.

Pleasure fit

Concepute special pentru tine, proiectate pentru a-ți urma forma, pentru o experiență mai confortabilă și mai plăcută.

Miros mai bine

Prezervativele Durex miros mai bine datorită modului în care sunt fabricate, respectând cerințele și standardele internaționale.

Pasul 1

Rupe ambalajul pornind de la o latură zimțată și scoate cu grijă prezervativul, deoarece poate fi deteriorat de unghii sau obiecte ascuțite (bijuterii sau piercing-uri). A se verifica data de expirare de pe ambalajul individual înaintea utilizării.



Pasul 2

Verifică dacă prezervativul este rulat spre exterior. Dacă este rulat spre interior, înseamnă că este pe dos. Strânge capătul închis al prezervativului pentru a te asigura că nu rămâne aer în interior.



Pasul 3

Continuând să strângi capătul închis, așază prezervativul pe vârful penisului și rulează-l în jos cu cealaltă mână. Dacă începe să se ruleze înapoi în timpul actului sexual, rulează-l la loc imediat. Dacă iese cu totul, oprește-te și pune alt prezervativ. Imediat după ejaculare, cât timp penisul este încă în erecție, prezervativul trebuie ținut ferm la baza penisului, înaintea retragerii acestuia, pentru a preveni alunecarea. Prezervativele prea largi sau prea strâmte se pot rupe.



Pasul 4

Dupa retragerea penisului, scoate pur și simplu prezervativul, împachetează-l într-un șervețel și aruncă-l în coșul de gunoi. Nu îl arunca în toaletă

Citește cu atenție informațiile despre produs, inscripționate pe partea interioară a pachetului, mai ales dacă folosești prezervativele pentru sex anal sau oral. Folosește un prezervativ o singură dată. Nicio metodă contraceptivă nu oferă protecție 100% împotriva sarcinii, HIV, sau a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Prezervativele Durex sunt dispozitive medicale. Referitor la riscuri, citește precauțiile și instrucțiunile de utilizare sau întreabă-ți medicul!

Consultați medicul sau farmacistul dacă: utilizați unguente medicinale, aplicate pe penis sau vagin; senzația de iritare/disconfort persistă după utilizare; nu sunteți sigur dacă sunteți alergic la latex; un prezervativ prezintă scurgeri sau se rupe în timpul utilizării (acest lucru se face cât mai curând posibil,

în termen de maxim 72 de ore); tu sau partenera ta experimentați dificultăți respiratorii sau aveți buzele albastre.

Alege prezervativul Durex potrivit tine:

	 Prezervative Durex Originals	 Prezervative Durex Feel Intimate	 Prezervative Durex Real Feel	 Prezervative Durex Invisible	 Prezervative Durex Pleasure Me	 Prezervative Durex Intense
Ambalare	3/18 buc	12/18 buc	3/10/16 buc	10 buc	3/12 buc	3/10/16 buc
Lubrifiere		 extra lubrifiat				 extra lubrifiat
Formă						
Fără latex	X	X	✓	X	X	X
Circumferință	 56 mm	 56 mm	 56 mm	 54 mm	 56 mm	 56 mm
Grosime (micron)	 normală ≥65<75	 subțire ≥55<65	 normală ≥65<75	 extra subțire ≥45<55	 mare ≥75	 normală ≥65<75

Despre Durex:

Cu peste 90 de ani de experiență, Durex reprezintă o marcă de încredere pentru milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Durex întrunește toate standardele de calitate pentru prezervative la nivel mondial, oferindu-ți încredere pentru o viață sexuală fără griji. Fiecare prezervativ este testat electronic pentru eliminarea defecțiunilor și a fisurilor. Toate prezervativele Durex sunt fabricate prin tehnologia „Easy on”, datorită căreia prezervativul poate fi aplicat ușor și repede, fiind totodată mai confortabil.

