

fisiocrem PATCH ACTIVE

Fisiocrem Patch Active este soluția eficientă indicată pentru tratamentul durerii musculare și articulare. Tehnologia exclusivă cu microcurenți a produsului Fisiocrem Patch Active acționează pentru a ameliora durerile musculare, articulare și contracturile de diferite tipuri.

Plasturele este compus din două straturi, un strat exterior cu benzi de cupru și zinc și un strat adeziv interior care conține extracte de arnică și harpagofito. Atunci când plasturele vine în contact cu sărurile minerale care se găsesc în mod natural în pielea noastră, sunt generați microcurenți de intensitate scăzută care oferă o ușurare în zona durerii.

Plasturele are un efect ocluziv ce protejează zonele corpului care suferă de dureri musculare și articulare și, împreună cu microcurenții generați, oferă o ușurare în zona inflamată timp de până la 24 de ore. Microcurenții generați sunt de intensitate scăzută, sporind confortul și acționând timp de 24 ore, fără senzații neplăcute.

Fisiocrem Patch Active a fost conceput pentru a permite o bună aderență timp de până la 24 de ore pe toate zonele corpului, inclusiv pe proeminențe osoase. Aderența sa constantă asigură confort maxim în timpul activității zilnice.

MOD DE UTILIZARE: Asigurați-vă că pielea este curată, uscată și fără nicio cremă. Îndepărtați folia de protecție de pe spatele produsului și aplicați plasturele adeziv pe zona care urmează să fie tratată, astfel încât să adere în mod corespunzător pe piele. Plasturele poate fi tăiat la dimensiunea dorită pentru a se potrivi zonelor mai mici. Lăsați produsul să acționeze timp de 8 până la 24 de ore, în funcție de nevoi, apoi înlocuiți-l cu unul nou, dacă este necesar, până la maximum 30 zile consecutive. După utilizare, închideți din nou pungă cu fermoarul.

AMELIORAREA DURERII ARTICULARE ȘI MUSCULARE

Distribuitor:
URIACH ROMANIA S.R.L.
Strada Sirului, nr.6-8,
014354, București, România



 x4 Plasturi


MĂSURI DE PRECAUȚIE: Numai pentru uz extern, nu se aplică pe ochi și pe membranele mucoase. Utilizați numai pe pielea sănătoasă. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Dacă prezentați iritații evidente sau hipersensibilitate la produs, întrerupeți tratamentul. Consultați medicul în caz de sarcină sau alăptare. Pentru adulți și copii peste 12 ani. Produsul este de unică folosință, deoarece o a doua utilizare ar reduce proprietățile sale adezive și nu ar garanta eficacitatea sa. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Păstrați plasturiile rămași în pungă până la utilizare.

PLASTURE CU TEHNOLOGIE
CU MICROCURENȚI



STRATUL EXTERIOR
BENZI DE CUPRU ȘI ZINC

STRATUL INTERIOR
ARNICĂ ȘI HARPAGOFITO

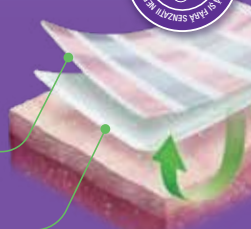

Cutia conține o pungă cu închidere cu 4 plasturi de 7 x 9,5 cm pentru uz extern.



DISPOZITIV MEDICAL

 Fastmeditalia Srl.
Sede legal: Via Fiume 25, 20832 Desio (MB) Italia

Sede operativa: Via G. Verdi 16/B,
21020 Mornago (VA), Italia