

# AKUTOL™ STOP spray

## Hemostatic cu alginat

- + oprește sângerările minore
- + calmează zona afectată

Dispozitiv medical AKUTOL™ STOP spray se utilizează pentru oprirea sângerării rănilor mici de suprafață. Componenta activă cu alginați creează un strat de pulbere peste rană. Acest strat absoarbe sângele din zona afectată, formând un hidrogel de răcire. Hidrogelul protejează rana, calmează zona afectată și stimulează procesul natural de vindecare.

**Indicații terapeutice:** Spray pentru oprirea sângerării rănilor mici de suprafață.

**Indicații:** AKUTOL™ STOP spray se utilizează pentru oprirea sângerării (*Hemostasis*) rănilor mici de suprafață.

**Contraindicații:** Nu este destinat pentru sângerări abundente, răni adânci sau infectate și arsuri. A nu se folosi pe față. Evitați contactul cu ochii și mucoasele. A nu se utiliza la sugari și copii cu vârsta sub 3 ani! Nu se recomandă utilizarea acestuia la persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele conținute.

*Utilizatorul vizat:* Pentru populația generală, pentru toate categoriile de vârstă, pentru copii cu vârsta de peste 3 ani și pentru diabetici. Consultați un medic pentru utilizarea în timpul sarcinii sau alăptării.

*Locul de aplicare preconizat:* AKUTOL™ STOP este destinat tuturor părților corpului, cu excepția feței, nu este destinat pentru tratarea mucoaselor sau a orificiilor organismului.

**Doza recomandată, modul de utilizare:** Citiți instrucțiunile pentru o utilizare în siguranță. Curățați zona afectată și agitați bine recipientul de spray! În timpul pulverizării, țineți recipientul în poziție verticală! Aplicați hemostaticul prin apăsarea pulverizatorului de la o distanță de 15 - 20 cm de suprafața corpului. Aplicați sprayul pe întreaga zonă a răniei și lăsați să se usuce. **Hemostaticul formează un strat de pulbere care absoarbe și coagulează sângele formând un hidrogel de răcire.** Hidrogelul protejează și calmează zona afectată și îmbunătățește procesul natural de vindecare. Dacă este necesar, repetați aplicarea până la oprirea sângerării. Stratul de hidrogel de pe rana uscată va cădea după un timp. Rana uscată poate fi acoperită cu spray AKUTOL™ sau alt tip de pansament respirabil. La primul contact poate provoca o senzație de arsură de moment.

### **Precauții speciale de siguranță:**

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. A nu se utiliza în apropierea focului. Evitați contactul cu ochii. Evitați inhalarea spray-ului. Orice incident grav nedorit legat de acest produs ar trebui să fie comunicat producătorului și Institutului de Stat pentru Controlul Medicamentelor. Aerosol extrem de inflamabil. Recipientul este sub presiune: la încălzire, acesta poate exploda. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A nu se pulveriza în flăcări deschise sau alte surse de aprindere. A nu se străpunge sau arde chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. A nu se expune la temperaturi de peste 50 °C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperaturi de 5-25 °C. A se utiliza cel târziu până la data indicată pe recipient. Aruncați ambalajul conform regulilor de eliminare a deșeurilor.


### *Compoziție:*

Methylal, Butane, Algin, Propane, Calcium Alginate, Stearalkonium Hectorite, Alcohol Denat., Isobutane, PPG-2 Methyl Ether, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Aloe Ferox Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Menthol.

Data revizuirii textului: 20.02.2019



AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă

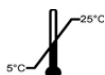

termen de valabilitate, la baza recipientului



**Distribuitor:** EST INVEST FARMA S.R.L., Iași, Piața Voievozilor, bloc X6, tronson 1, parter  
0232.233.386. office@estinvestfarma.ro