

## **MINI ERGONOMIC periuță Interdentară 0.45mm**

Pentru o igienă orală completă. Îndepărtează placa dentară bacteriană și reziduurile alimentare din locurile greu accesibile.

**UȘOR DE UTILIZAT:** Inserați cu grijă periuța în spațiile interdentare și trageți încet, cu mișcări ușoare, înainte și înapoi. Înainte de aplicarea în spațiile interdentare, pentru o curățare completă, aplicați pe periuță 2-3 picături de UNISEPT INTERDENTAL CLEANSER. După utilizare, clătiți cu apă și uscați periuța pentru o nouă reutilizare.

**ATENȚIE:** Pentru a evita leziunile gingivale, persoanele cu spații interdentare înguste nu trebuie să aplice presiune în timpul procedurii de curățare. Periajul trebuie efectuat doar cu mișcări ușoare. Periajul forțat și excesiv duce la uzura periuței, cauzând răni gingivale.

**PRODUCĂTOR:** INTERMED S.A. Pharmaceutical Laboratories, str. Kalyftaki 27, GR 14564 Kifissia, Grecia.

**DISTRIBUITOR:** ND Medhealth S.R.L. – Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, Sector 2, București, România, Tel.: (+4) 0721 298 338 **EAN** 5205152016489